



SANOSIL

DISINFECTANTS FOR LIFE 



Sanosil S003

DÉSINFECTANT PRÊT À L'EMPLOI
POUR LA DÉSINFECTION DES SURFACES

www.sanosil.com

Sanosil S003

Désinfectant pour la désinfection des surfaces



Désinfectant fiable et polyvalent pour les surfaces et les équipements

- ✔ Bonne efficacité contre les bactéries, les virus (enveloppés), les levures et les champignons, sur la liste du VAH
- ✔ Easy Application facile et sans danger (prêt à l'emploi)
- ✔ Ne laisse pas les surfaces collantes
- ✔ Ne dégage pas d'odeur désagréable
- ✔ Sans alcool, sans chlore / composé chloré ou composé d'ammonium quaternaire
- ✔ Sans colorant et sans parfum
- ✔ Contient du peroxyde d'hydrogène renforcé catalytiquement
- ✔ Le peroxyde d'hydrogène se décompose à 100 % en eau et en oxygène
- ✔ Peut être stocké pendant 2 ans
- ✔ Produit de qualité de fabrication suisse



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com



DESCRIPTION DU PRODUIT

Sanosil S003 est un désinfectant de surface avec une certification médicale DGHM/ VAH et un effet de dépôt de longue durée. Il est basé sur la formulation éprouvée peroxyde d'hydrogène/argent de Sanosil et ne dégage aucune vapeur inflammable ou malodorante.

Le principe actif utilisé est le peroxyde d'hydrogène, qui est soigneusement stabilisé et dont l'effet contre les micro-organismes est considérablement renforcé par l'ajout de 0,003 % d'argent. **Ainsi, l'effet de désinfection peut être augmenté d'environ 800 %.**

Le peroxyde d'hydrogène se décompose complètement en eau et en oxygène après application. Les minimales traces d'argent restant sur la surface après la désinfection inhibent la multiplication des germes pendant une période allant jusqu'à 72 heures.



Sanosil S003



EN BREF

TYPE DE PRODUIT

Prêt à l'emploi

ADAPTÉ POUR

Désinfection des lingettes, pulvérisation ciblée avec un appareil

EFFETS CONTRE

Bactéries, levures, virus (grippe A, corona), champignons

DURABILITÉ

2.5 ans

SOMMAIRE

1,5g/100g de peroxyde d'hydrogène, 0,003g/100g d'argent

DÉSINFECTION: CONNAISSANCES DE BASE

Note 1: l'effet désinfectant est toujours plus élevé si la surface à désinfecter est préalablement nettoyée aussi soigneusement que possible.

Note 2: la combinaison de la pulvérisation et de l'essuyage ou l'application avec une lingette humide ont un effet nettement supérieur que la pulvérisation seule.

MODE D'ACTION

- 1 L'oxygène ($^1\text{O}_2/\text{O}_2$) libéré par le peroxyde d'hydrogène attaque les parois cellulaires des micro-organismes. Ceux-ci sont dénaturés et détruits par l'oxydation (combustion froide).
- 2 Cet effet est soutenu par les ions d'argent, qui renforcent de manière catalytique l'effet du peroxyde. En outre, ils bloquent le métabolisme (lorsqu'il est présent) et la capacité des germes à se multiplier.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com



DESINFECTION DES SURFACES

(pulvérisation et l'essuyage)

Indication: lors du transvasement du S003 dans des flacons pulvérisateurs, etc., une étiquette contenant des informations sur le contenu doit être apposée à l'extérieur du récipient correspondant.



ÉTAPE 1

Nettoyez soigneusement la surface à traiter avec un produit de nettoyage approprié. Plus la surface est propre, meilleur est l'effet de désinfection.

ÉTAPE 2

Mettez des gants. Humecter une lingette avec du Sanosil S003 non dilué.

Dosage sur les surfaces lisses : 30-50 ml/m²



ÉTAPE 3


Mouillez la surface à désinfecter avec le chiffon de façon à ce qu'il reste un film humide. Si des gouttes restent à la surface, frottez-les avec un chiffon approprié.

Sinon, les gouttes restantes pourraient laisser des taches gris argent après avoir séché dans des conditions

ÉTAPE 4

Laissez sécher.

Temps nécessaire : environ **15 minutes**.

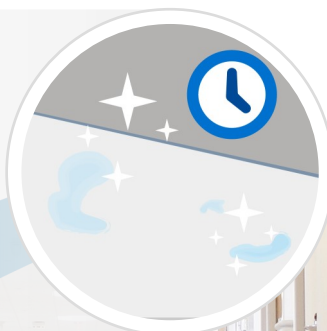

Sanosil S003



EFFICACITÉ

NORMES / TEMPS DE CONTACT

BACTERIA

Bactéricide :

EN1276: Faible charge: 5 min

EN1276: Charge élevée: 15

EN13697: Charge élevée: 30 min

EN16615: Charge élevée: 15 min

YEAST

Levurocide :

EN1650: Charge élevée: 30 min

EN13697: Charge élevée: 5 min

EN16615: Charge élevée: 5 min

FUNGI

Fongicide

EN1650: Faible charge: 30 min

VIRUS

Virucide : (Influenza A *)

EN14476: Faible charge: 30 sec.

*s'applique également aux
Coronavirus selon B.A.G

Remarque: Lors de la pulvérisation directe avec un appareil, la formation d'aérosols doit être évitée autant que possible. Pour les applications plus importantes que les zones domestiques normales / pendant plus de 30 min par jour, une protection respiratoire appropriée doit être portée pour éviter l'irritation des voies respiratoires.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com

www.sanosil.com



DÉSINFECTION DE SURFACE

avec des lingettes SanoWipes

Les SanoWipes sont des lingettes sèches contenues dans un seau distributeur pratique doté d'un couvercle refermable. Elles sont imbibées de désinfectant avant usage et sont ensuite prêtes à l'emploi pendant plusieurs semaines. Une fois imbibées, les SanoWipes sont idéales pour la désinfection rapide de petites surfaces, entre deux désinfections plus conséquentes.



ÉTAPE 1

Enfilez des gants. (Consigne de sécurité fondamentale pour l'utilisation du désinfectant.)



ÉTAPE 2

Enlevez la pellicule protectrice du rouleau de lingettes et placez ce dernier dans le seau.




ÉTAPE 3

Imbibez le rouleau avec une solution de Sanosil S015 que vous venez de préparer *

Dosage : 1 à 1,2 l par rouleau.

* Attention : La solution ne peut être conservée plus de 48 h que si elle a été préparée avec de l'eau distillée.

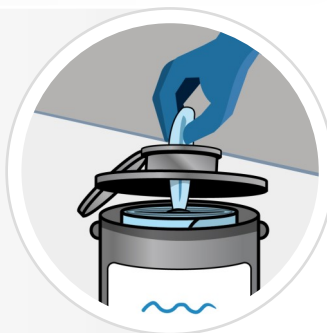

ÉTAPE 4

Tirez la première lingette à travers l'orifice de distribution et fermez correctement le couvercle transparent. (Indication : les lingettes peuvent légèrement se décolorer avec le temps sous l'effet de la lumière, ceci n'altère cependant en rien leur qualité.)



ÉTAPE 5

Prenez une lingette SanoWipe imbibée de produit et essuyez soigneusement à plusieurs reprises la surface à désinfecter. Veillez à porter des gants pour réaliser cette opération, de façon à éviter un contact prolongé du produit avec la peau.



SanoWipes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU

PET— optimisé pour l'application de liquides

NOMBRE DE LINGETTES PAR ROULEAU

90

DIMENSIONS DES LINGETTES

3env. 36 x 20 cm



Indication: Always attach a label with information about the contents after filling the SanoWipes dispenser bucket. Suitable labels are available from Sanosil on request.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com



DÉSINFECTION DES SURFACES

(avec pulvérisateur - pour les utilisateurs professionnels)

Attention: l'utilisation d'un équipement de pulvérisation professionnel entraîne toujours la production d'une certaine quantité d'aérosols, qui peuvent nuire à la santé. Par conséquent, il faut toujours porter un masque complet de protection respiratoire P3 pendant les travaux de pulvérisation prolongés pour éviter l'irritation des voies respiratoires et des yeux. (Respirateur avec filtre à gaz (contre le peroxyde d'hydrogène) Type de filtre : ABEK-P3

ÉTAPE 1

Nettoyez soigneusement les surfaces à traiter avec un produit de nettoyage approprié. Plus le nettoyage est efficace, plus la désinfection l'est aussi.

Versez la quantité nécessaire de Sanosil S003 dans le réservoir de stockage d'un pulvérisateur (par exemple Sanosil Stream / Stream Compact, pulvérisateur de stockage pressurisé avec connexion d'air comprimé, pulvérisateur airless, etc.).



ÉTAPE 2

Choisissez une méthode de pulvérisation aussi fine que possible et pulvérisez les surfaces à désinfecter de manière à créer une surface légèrement humide partout. (Cf. le miroir de la salle de bain embué lors de la douche).

Valeur indicative : 30 - 50 ml/m².

Évitez les gouttes, ou les flaques

Empêchez les aérosols inévitablement formés lors de la désinfection par pulvérisation d'atteindre les parties du local où se trouvent des personnes non protégées.



ÉTAPE 3

Laissez le produit faire son effet. Pour des raisons de sécurité, il convient de ne pas pénétrer dans la pièce sans équipement de protection jusqu'à 2h après la désinfection par pulvérisation.

(Valeur limite du peroxyde d'hydrogène : 1 ppm).

Si la valeur limite est trop élevée, prolongez le temps d'attente ou ventilez bien. Il ne doit y avoir ni odeur de désinfectant ni irritation des voies respiratoires / des yeux.



Remarque: Plus les gouttelettes sont fines, meilleur est le mouillage. Évitez les gouttes/flaques et les coulures dues à une application excessive du matériau. Si cela se produit quand même, passez un coup de chiffon avant de sécher. Sinon, il y a un risque de décoloration



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com



DÉSINFECTION DES SOLS

(avec balai de nettoyage pulvérisateur)

Remarque: les housses de serpillière pré-humidifiées conviennent également. Pour les grandes surfaces (par exemple les tapis de sport), il est également recommandé d'utiliser en parallèle un pulvérisateur manuel puissant pour la pulvérisation et un mop pour l'essuyage.

ÉTAPE 1

Nettoyez soigneusement la zone à traiter avec une serpillière et un produit de nettoyage adapté.

ÉTAPE 2

Versez Sanosil S003 dans le conteneur de stockage d'un applicateur approprié.

ÉTAPE 3

Mouillez la surface avec l'applicateur afin qu'il reste un film uniformément humide qui peut sécher en quelques minutes. Laissez l'agent travailler / sécher.



DÉSINFECTION DE PETITES PIÈCES

(joints, pièces de tuyaux, etc.)



ÉTAPE 1

Si possible, lavez les pièces à traiter au lave-vaisselle ou à la main.

ÉTAPE 2

Remplissez Sanosil S003 dans un récipient et placez-y les pièces. Après quelques minutes, sortez-le et laissez-le sécher. Tant que le Sanosil S003 n'est pas souillé, la solution peut être utilisée plusieurs fois.

Utiliser les biocides en toute sécurité. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Nos recommandations en matière d'application, écrites ou orales, sont le fruit d'un grand nombre d'essais. Nos conseils se basent sur l'état le plus avancé des connaissances actuelles. Ils sont cependant donnés sans engagement de notre part puisque nous n'avons aucune influence directe sur l'utilisation et le stockage. Les descriptions de produits ou les données sur les propriétés des préparations n'engagent pas notre responsabilité en cas d'éventuels dommages.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG * CH-8634 Hombrechtikon * Suisse
E-Mail: service@sanosil.com * Web: www.sanosil.com
www.sanosil.com





SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG

CH-8634 Hombrechtikon
Suisse

E-mail: service@sanosil.com

www.sanosil.com

